

	<p align="center">CHARGEMENT DES LAVEURS</p> <p align="center">Pharmacie à Usage Intérieur</p> <p align="center">DMS – STERILISATION</p>	CHUPROC1249	Version 01
		Date d'application : 11/04/2022	

I. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure définit les modalités de préparation et de chargement de l'instrumentation dans une machine de lavage appelée « laveur » au sein du service de stérilisation du CHU Amiens-Picardie.

II. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

II.1 DEFINITIONS

Machines de lavage : L'unité de stérilisation possède, de gauche à droite sur la photo :

- 1 Laveur désinfecteur simple (capacité 1 rack)
- 3 Laveurs désinfecteurs double (capacité 2 racks)
- 1 Sas de retour de racks
- 1 Laveur désinfecteur simple dédié au traitement prionicide (« Laveur N°3 ATNC » appelé aussi « Bayou N°3 ATNC »)



II.2 ABREVIATIONS

ATNC : Agents Transmissibles Non Conventionnels
DM : Dispositifs Médicaux

III. DESCRIPTION

Le laveur 3 ATNC est réservé exclusivement aux DM immergeables à risque orange.

Les racks sont placés prioritairement dans les laveurs doubles. Si la dernière charge d'une tournée est composée d'un seul rack, utiliser le laveur simple.

III.1 PRÉPARATION D'UNE CHARGE DE LAVAGE


Traiter les boîtes une par une afin de ne pas mélanger les instruments.

Ouvrir les instruments afin de faciliter le lavage et les répartir de façon équitable dans le panier ou dédoubler-les dans un deuxième panier si nécessaire. Dans ce cas, disposer une plaquette blanche avec la dénomination de la boîte, dans chaque panier ayant servi au dédoublement de façon à pouvoir regrouper tous les DM après leur passage par l'agent affecté en sortie laveurs.

Regrouper les bistouris, les alènes de Redon et de façon générale tous les instruments piquants, coupants ou tranchants au moyen d'un élastique.

Pour les petits instruments, les mettre :

- dans un tube (1),
- une boule à thé (2)
- une boîte à bijoux (3)

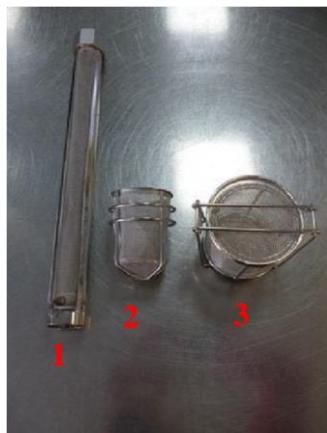

Vérifier l'intégrité des DM (pas d'instrument détérioré ni cassé, pas d'instrument sale...)

Si besoin, inscrire la non-conformité observée dans la réception informatique de l'armoire, faire un constat qualité réception, utiliser le Sanivap...


Fermer les paniers au moyen d'un couvercle et maintenir l'ensemble par un élastique puis les placer sur un rack de lavage.

Assurez-vous de ne pas bloquer les hélices en plaçant les paniers.

Possibilité d'irriguer les corps creux.



Procéder à la saisie informatique. Appuyer sur « lavage » puis sur « chargement »

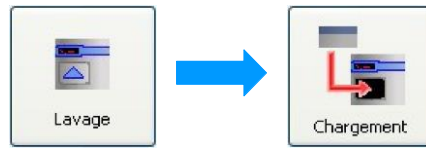

Scanner le rack de lavage.
Scanner tous les DM.

En cas d'erreur, vous pouvez retirer un ou plusieurs produits de la charge en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton correspondant

Appuyer sur « valider »



Scanner votre badge

A screenshot of a login interface. On the left is the 'MM France' logo with 'MMM Group' below it. To the right are two input fields: 'Login' and 'Mot de passe'. Below the fields are two buttons: 'Annuler' with a red 'X' icon and 'OK' with a green checkmark icon.

CAS PARTICULIER DES BOITES DE COELIOSCOPIE

Les dispositifs médicaux des boîtes de coelioscopie sont placés sur des racks spéciaux pour assurer un lavage et une irrigation corrects des différentes pièces.



III.2 CHARGEMENT DES LAVEURS

- Sélectionner la machine de lavage



- Appuyer sur « charger »




- Scanner votre badge




III.3 LANCEMENT D'UN CYCLE DE LAVAGE

- ✓ POUR LES LAVEURS CONVENTIONNELS SIMPLE ET DOUBLE

Présenter le rack près du convoyeur avec le chariot, le pointeur du convoyeur est relevé. Accolez le chariot sur le convoyeur, le pointeur du convoyeur se rabaisse.

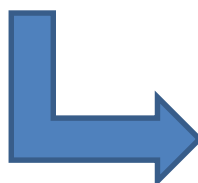

Tourner la poignée du chariot vers la droite pour amorcer le chariot, le pointeur du chariot se rabaisse.

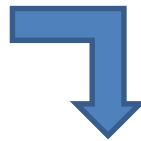

Le rack est alors entraîné automatiquement sur le convoyeur vers l'unité de lavage et le cycle démarre lorsque 2 racks sont chargés.
Tourner la poignée du chariot vers la gauche pour détacher le chariot du convoyeur.

✓ POUR LE « LAVEUR 3 ATNC »

Ce laveur ne possède pas de convoyeur automatique.

Accoler le chariot au laveur.

Ouvrir la porte : Appuyer 2 fois successivement sur le bouton « Stop »

Charger le rack manuellement dans le laveur

Fermer la porte : Appuyer 2 fois successivement sur le bouton « Stop »

Démarrer le cycle : Appuyer sur le bouton « Start »
(Le choix du programme est automatique car unique)



IV. RÉFÉRENCES

Néant

V. ÉVALUATION

Néant

VI. DOCUMENTS ASSOCIÉS

Réception des armoires et tri des instruments – [CHUPROC1239](#)

Utilisation du générateur de vapeur SANIVAP – [CHUFT3350](#)

Démarrage et arrêt des machines et des ordinateurs – [CHUFT3351](#)

Montage d'un rack de cœlioscopie – [CHUFT3352](#)

Constat qualité réception – [CHUFO2949](#)

VII. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Création du document

VIII. RÉDACTION, VALIDATION, APPROBATION**Groupe de travail :**

NOMS ET FONCTIONS DES SIGNATAIRES	DATES DE SIGNATURE
Relecture qualité	
Ingénieur qualité , Pôle Efficience, Finances et Qualité	05/04/2022 11:53:49
Rédaction	
Sabine ALAIN, Pharmacien, PUI-STERILISATION Thomas DIERICK, Pharmacien, PUI-STERILISATION	05/04/2022 13:53:58, 07/04/2022 07:02:37
Validation	
Mohamed BELHOUT, Pharmacien-Gérant, PUI	11/04/2022 07:27:33
Approbation	
Directeur qualité , Pôle Efficience, Finances et Qualité	11/04/2022 07:59:53