

	<p align="center">DÉCHARGEMENT DES CABINES</p> <p align="center">Pharmacie à Usage Intérieur</p> <p align="center">DMS – STERILISATION</p>	CHUPROC1250	Version 01
		Date d'application : 11/04/2022	

I. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure définit les modalités de déchargement des cabines de lavage au sein du service de stérilisation du CHU Amiens Picardie.

II. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

II.1 DEFINITIONS

Cabine de lavage : Machine permettant d'effectuer le lavage des :

- Containers
- Bacs de pré désinfection avec couvercles et plateaux bleus
- Sabots
- Armoires de transport

II.2 ABREVIATIONS

Néant

III. DESCRIPTION

III.1 DÉCHARGEMENT MANUEL DE LA CABINE

1. Sortir manuellement les armoires et les chariots après ouverture automatique des portes de la cabine à la fin du cycle.




2. Fermer la porte à l'aide du bouton bleu sur la façade de la cabine de lavage.



III.2 VALIDATION DES GRAPHIQUES DE LAVAGE

1. Valider la conformité du cycle en vérifiant toutes les valeurs inscrites par rapport aux valeurs du graphique de référence.
2. **Si le graphique n'est pas conforme**, c'est à dire si vous constatez qu'une ou plusieurs valeurs du graphique sont en dessous ou au-dessus de la valeur de référence ou si le type de cycle n'est pas conforme par rapport à la charge nettoyée, prévenez un pharmacien.
Si le pharmacien accepte la charge, valider informatiquement la charge.
Si le pharmacien refuse la charge, refuser la charge informatiquement et retourner-la en réception afin d'effectuer un nouveau lavage.

Exemple d'un graphique de bacs :

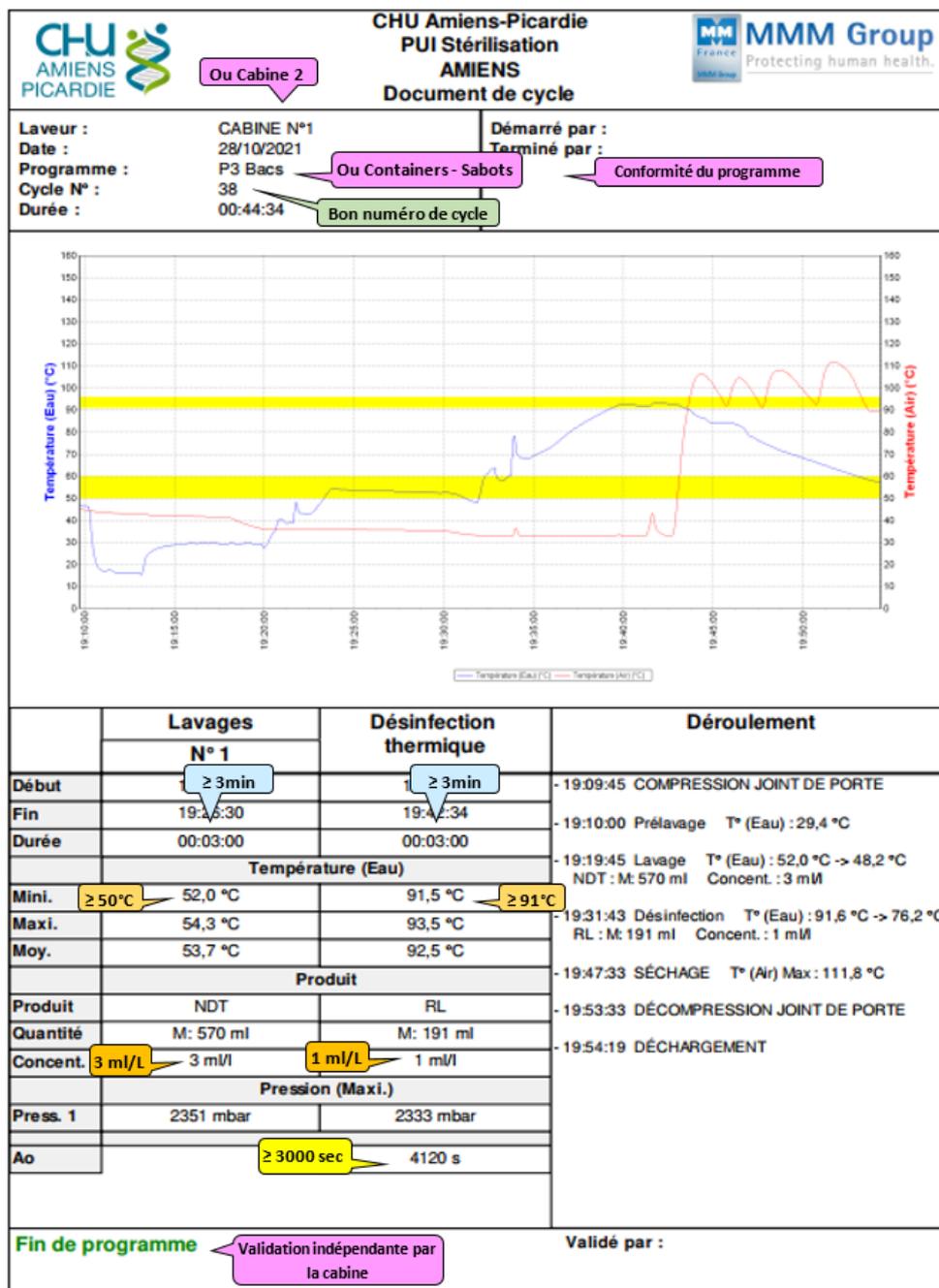


III.3 ORIENTATION DES ARMOIRES, RACKS DES ARMOIRES, BACS, CONTAINERS ET PLATEAUX BLEUS EN SORTIE DE CABINE

- Les racks sont désolidarisés des armoires et sont orientés vers la zone ISO.
- Les armoires (fermées et sans rack) et la moitié des bacs de pré désinfection sont orientées vers le couloir propre via le sas cabine
- L'autre moitié des bacs de pré désinfection, les plateaux bleus et les containers sont orientés vers la zone ISO.

III.4 DÉCHARGEMENT INFORMATIQUE DES CONTAINERS

1. Appuyer sur « Lavage » puis sur « Lavage Manuel »

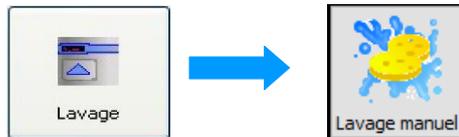

2. Scanner les containers des DM concernés.

Si un container apparaît avec l'indicateur « risque orange », ne valider pas la charge et appeler un pharmacien. En effet, le container ayant le même code que la boîte, cette dernière doit d'abord être inactivée pour ensuite pouvoir valider le container associé.

3. Appuyer sur le bouton « container »



4. Appuyer sur « valider »



5. Scanner votre badge



IV. RÉFÉRENCES

Néant

V. ÉVALUATION

Néant

VI. DOCUMENTS ASSOCIÉS

Néant

VII. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Création du document

VIII. RÉDACTION, VALIDATION, APPROBATION

Groupe de travail :

NOMS ET FONCTIONS DES SIGNATAIRES	DATES DE SIGNATURE
Relecture qualité	
Ingénieur qualité, Pôle Efficience, Finances et Qualité	05/04/2022 11:54:12
Rédaction	
Sabine ALAIN, Pharmacien, PUI-STERILISATION Thomas DIERICK, Pharmacien, PUI-STERILISATION	05/04/2022 13:54:45, 07/04/2022 07:02:56
Validation	
Mohamed BELHOUT, Pharmacien-Gérant, PUI	11/04/2022 07:27:03
Approbation	
Directeur qualité, Pôle Efficience, Finances et Qualité	11/04/2022 08:00:11