

	<p style="text-align: center;"><b>PRÉPARATION ET STÉRILISATION DU LINGE HOSPITALIER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pharmacie à Usage Intérieur</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DMS - STERILISATION</b></p>	CHUPROC1241	Version 01
		Date d'application : 28/03/2022	

## I. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure définit les pratiques permettant le pliage et la mise en sac de linge hospitalier afin de garantir sa bonne utilisation après stérilisation.

## II. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

### II.1 DEFINITIONS

**Linge hospitalier** : On entend par linge hospitalier les couches, les draps et les jarretelles

### II.2 ABREVIATIONS

Néant

## III. DESCRIPTION

### III.1 RÉCEPTION DU LINGE ET VÉRIFICATION DE LA PROPRETÉ

Les blocs opératoires envoient un fax avec leur demande de quota de linge. Un agent de stérilisation, muni d'un chariot de transport, va chercher la commande à la blanchisserie.

La réception et la vérification de la propreté du linge est faite dans le local « réception du linge » côté propre.


- Déplier entièrement le linge afin de **vérifier la propreté et réajuster les coins**
- Pour les draps adultes, les déplier sur la longueur uniquement
- Dans le cas de linge sale et/ou taché, le mettre dans le sac destiné à cet effet et placé dans le local « réception du linge » côté propre.

### III.2 PLIAGE DU LINGE

#### LES COUCHES

Méthode de pliage :

- Étape 1/A: Plier le linge en 2 en ramenant le côté bas vers le côté haut
- Étape 1/B : Répéter l'étape 1/A
- Étape 2 : Plier de nouveau la couche en 2 mais en ramenant le côté gauche vers le côté droit
- Étape 3 : Plier de nouveau en 2, en ramenant le côté droit vers le côté gauche
- Étape 4 : Vérifier la présence du coin libre (en haut à gauche)

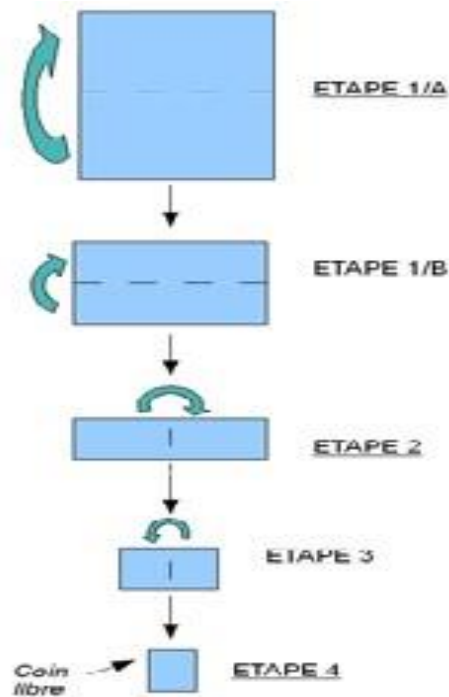

A la réception



Dépliage



Étapes 3 et 4



Étape 2




Étape 1/B

## LES DRAPS ADULTES

Méthode de pliage : à partir du drap déplié sur la longueur

- Étape 1 : Replier le drap en 2, mais par le dessous (c'est-à-dire inversez le sens du pli en ramenant le côté droit en dessous du côté gauche)
- Étape 2: Replier le drap en deux, en ramenant le bord droit vers le bord gauche
- Étape 3: Plier le drap en trois en ramenant une première fois le bord droit au un tiers du bord gauche, puis le « nouveau » bord droit au niveau du bord gauche
- Étape 4 : Ramener le bord du bas vers le bord du haut
- Étape 5 : vérifier la présence du coin libre (en haut à gauche)

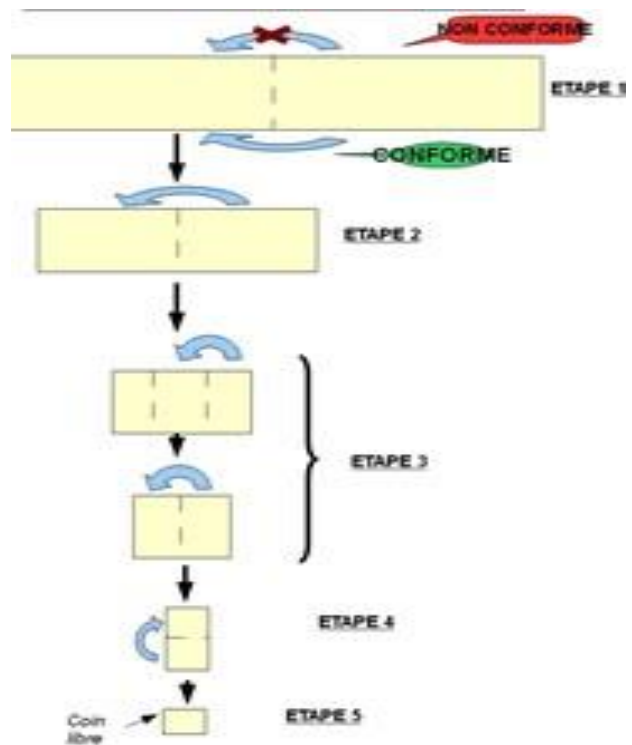

A la réception



Dépliage



Étape 3



Étapes 1 et 2

Etape 3

Étapes 4 et 5



## LES JARRETELLES

### Méthode de pliage :

- Étape 1 : Prendre la jarretelle sur une longueur de 1m20 (indicateur présent sur la table de préparation)
- Étape 2 : Dédoubler la jarretelle en 3 fois en laissant à la fin la partie libre vers le haut

### III.3 CONDITIONNEMENT

Emballer le linge selon les indications du tableau ci-dessous

Type de linge	Nombre d'unité par paquet :
Drap adulte	1
Couches	4 (non superposées)
Jarretelles	1

Le linge est conditionné sous double emballage avec des sachets de taille adaptée.

- Premier emballage côté propre et soudure du premier sachet côté ISO
- Deuxième emballage côté ISO et soudure du deuxième sachet côté ISO



COUCHES (X4)



DRAP ADULTE (X1)




JARRETELLES (X1)

### III.4 IMPRESSION DES ÉTIQUETTES DE TRACABILITÉ


- Ouvrir ECOSOFT®
- Cliquez sur « conditionnement » puis « reconstitution »



La fenêtre « reconstitution de l'unité de conditionnement » ci-dessous s'affiche

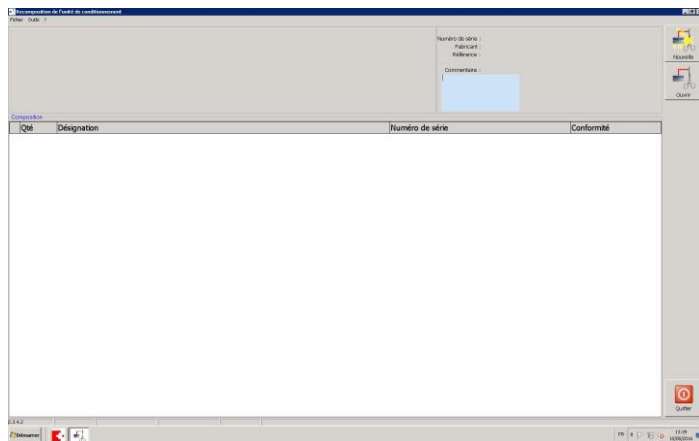


- Scannez le code barre du linge à reconstituer à l'aide de la douchette :

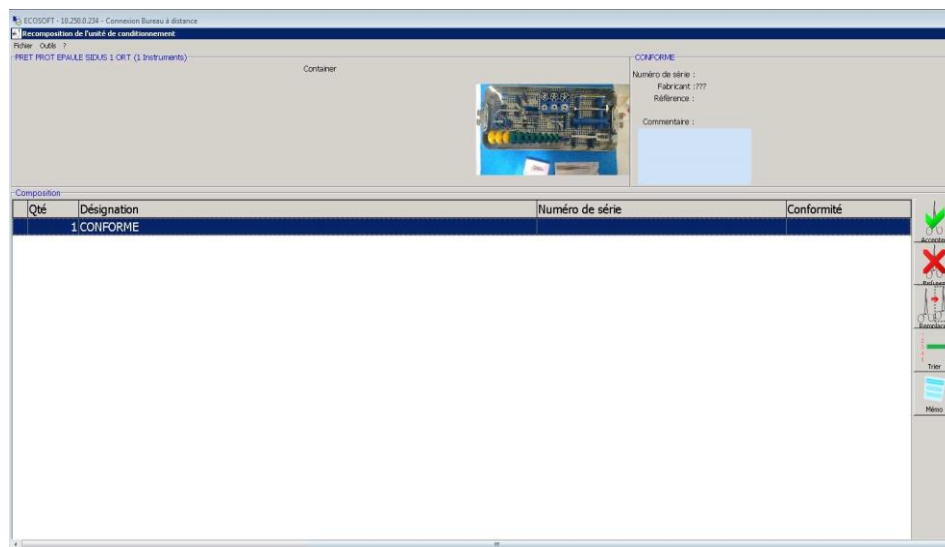

Possibilité d'agrandir la photo en cliquant dessus

- Validez en cliquant sur le bouton « accepter »



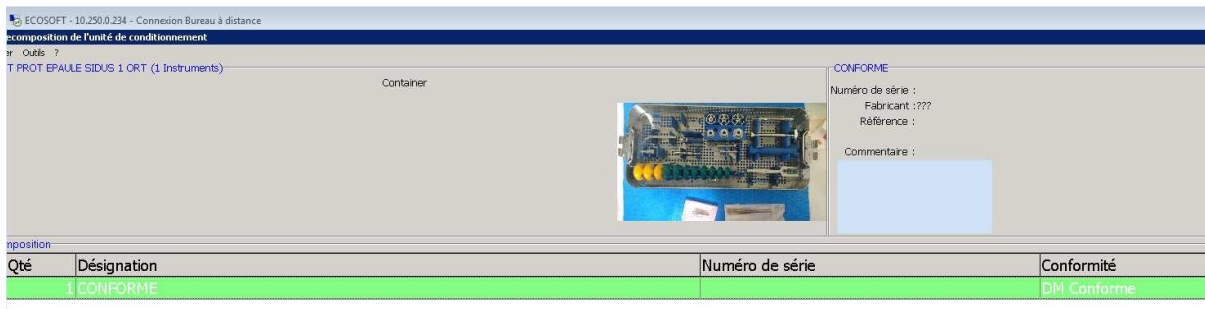

- La ligne apparaîtra en **vert**

- Appuyer sur « valider »



- Scanner votre badge,

- L'étiquette de traçabilité s'imprime.

### III.5 PREPARATION, CHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE ET LANCEMENT DU CYCLE

Les autoclaves qualifiés pour accepter des charges de linge sont le n°1, 2 et 3.  
Le linge est stérilisé seul, sans présence d'instrumentation.

### III.6 DECHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE ET LIBERATION DE LA CHARGE

Voir [CHUPROC1243](#) – Déchargement d'un autoclave

#### **IV. RÉFÉRENCES**

#### **V. ÉVALUATION**

#### **VI. DOCUMENTS ASSOCIÉS**

Chargement d'un autoclave – [CHUPROC1242](#)

Déchargement d'un autoclave – [CHUPROC1243](#)

#### **VII. HISTORIQUE DU DOCUMENT**

Création du document

#### **VIII. RÉDACTION, VALIDATION, APPROBATION**

**Groupe de travail :**

<b>NOMS ET FONCTIONS DES SIGNATAIRES</b>	<b>DATES DE SIGNATURE</b>
<b>Relecture qualité</b>	
<b>Ingénieur qualité</b> , Pôle Efficience, Finances et Qualité	<b>23/03/2022 11:23:59</b>
<b>Rédaction</b>	
Sabine ALAIN, Pharmacien, PUI-STERILISATION Thomas DIERICK, Pharmacien, PUI-STERILISATION	<b>25/03/2022 13:29:47, 23/03/2022 11:35:31</b>
<b>Validation</b>	
Mohamed BELHOUT, Pharmacien-Gérant, PUI	<b>25/03/2022 14:55:10</b>
<b>Approbation</b>	
<b>Directeur qualité</b> , Pôle Efficience, Finances et Qualité	<b>28/03/2022 07:04:23</b>